



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО


РУССКИЙ

icare
ic100

Только по
предписанию
врача

ВКЛЮЧЕНИЕ ТОНОМЕТРА И УСТАНОВКА НАКОНЕЧНИКА

1. Для включения тонометра нажмите кнопку "Выбрать" или "Измерить". Иллюстрации альтернативных способов запуска: *(не забывайте использовать наручный ремешок)*

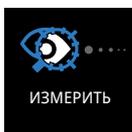

Нажатие кнопки "Выбрать"


Нажатие кнопки "Измерить"

2. Вскройте тубу наконечника, сняв колпачок, и установите наконечник в держатель, как показано на рисунке.
3. Когда на дисплее появится символ воспроизведения, тонометр готов к измерениям.





ИЗМЕРЕНИЕ

- Шаг 1.** Попросите пациента расслабиться и смотреть прямо вперед в одну точку. Поднесите тонометр к глазу пациента.

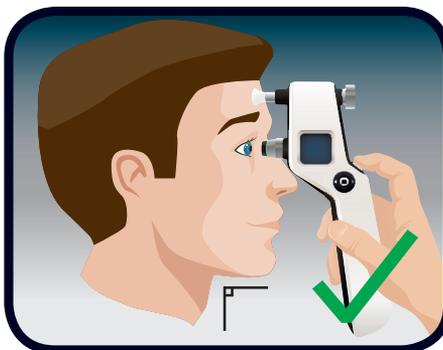

Шаг 2. Удерживайте наконечник в горизонтальном положении перпендикулярно центру роговицы. Расстояние от конца наконечника до роговицы пациента должно составлять от 4 до 8 мм. На держателе наконечника должен гореть зеленый свет.

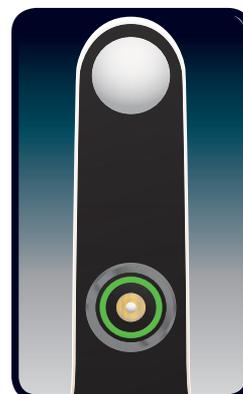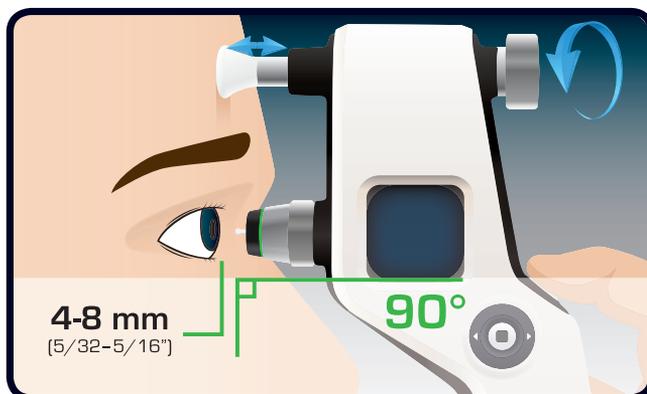

Зеленая световая индикация на держателе наконечника

Шаг 3. Нажмите кнопку "Измерить", чтобы измерить внутриглазное давление.

Наконечник будет касаться глаза во время измерений: нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы сделать 6 измерений подряд, ИЛИ нажмите кнопку, не удерживая ее, 6 раз, чтобы сделать по 1 измерению за раз.




ОДИН КОРОТКИЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ —
Указывает на правильное одиночное измерение.

ДВОЙНОЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ — —
Указывает на неправильное одиночное измерение (см. сообщения об ошибках в полном руководстве).

ДЛИННЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ —————
Указывает на шесть правильных измерений и вывод результата измерения внутриглазного давления на дисплей.

ИНФОРМАЦИЯ, ПОКАЗЫВАЕМАЯ НА ДИСПЛЕЕ ВО ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЙ

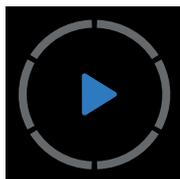

Перед измерением



После второго измерения



После шестого измерения




После шестого измерения с приемлемой вариацией



После шестого измерения со слишком большой вариацией

ЧАСТИ ТОНОМЕТРА

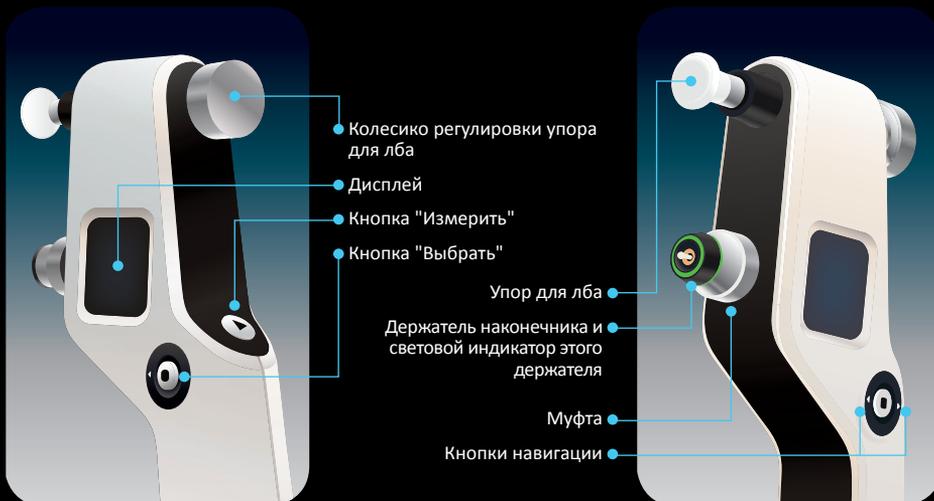

РЕГУЛЯРНО МЕНЯЙТЕ ИЛИ ОЧИЩАЙТЕ ДЕРЖАТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА, ЧТОБЫ НЕ ВОЗНИКАЛА НЕОБХОДИМОСТЬ В ЛИШНЕМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.

ОЧИСТКА ДЕРЖАТЕЛЯ НАКОНЕЧНИКА

Повторное использование держателя наконечника возможно после тщательной очистки. Перед использованием убедитесь в том, что держатель наконечника полностью высушен.

1. Открутите муфту держателя наконечника и осторожно снимите держатель наконечника с тонометра.
2. Перевернув держатель наконечника над контейнером с 70–100%-ным спиртовым раствором, отпустите держатель, чтобы он упал в контейнер. Пусть держатель наконечника постоит в растворе 5–30 минут.
3. Высушите держатель наконечника, вдывая в него сжатый воздух.
4. Осторожно установите заново полностью высушенный держатель наконечника на место и ввинтите муфту обратно в тонометр.

Более подробные инструкции по смене и очистке держателя наконечника см. в руководстве.

www.icaretonometer.com

Дополнительную информацию см. в руководстве (USB). 

